


AT-mini シリーズ / ツインビート R 用

# ヒーリングカレント導子

## 取扱説明書

保証書付

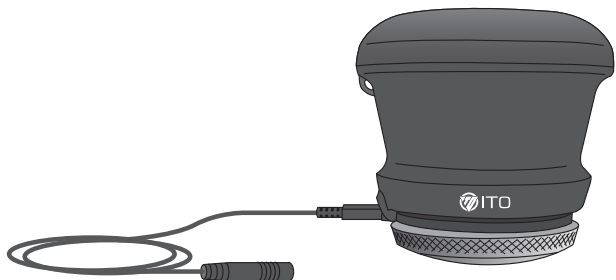

このたびは「ヒーリングカレント導子」をお買い求めいただき、ありがとうございます。いつでもお読みいただけるよう、本製品と取扱説明書を一緒に大切に保管してください。

使用する前に必ず取扱説明書をよく読み、  
正しくお使いください。

## 目 次

安全上のご注意	3
使用上のご注意	3
各部名称・仕様	6
使用方法	7
使用后	11
断線チェックについて	12
保証書	16

## 安全上のご注意

---

- 取扱説明書は本製品を安全にお使いいただくために必要です。本製品を人に貸したり、差し上げるときには点検を受けた上で、必ずこの取扱説明書を一緒にお渡してください。
- 接続する機器の取扱説明書の注意事項などをよく読み、安全を確認して正しくお使いください。

## ⚠ 使用上のご注意

---

1. 本製品は「AT-mini シリーズ」または「ツインビートRの“ケアコース”」でのみ使用してください。また、本製品は医療機器との接続はできませんのでご注意ください。  
特定の機器及びモード以外での使用による事故については、当社は責任を負いかねますのでご了承ください。
2. 次のような人および部位には使用しないでください。
  - 寒冷刺激に対して感覚の鈍い人や温度感覚喪失が認められる人
  - 寒冷過敏症の人 ●レイノー病の人 ●寒冷じんま疹の人
  - 紫斑病の人 ●クリオグロブリン血症の人
  - 金属アレルギーの人
3. 使用部位の皮膚に損傷・炎症、その他の異常がないことを確認してください。
4. 同じ部分へ長い時間当てないでください。血行障害や凍傷の原因となるおそれがあります。

## ⚠ 使用上のご注意

---


5. 氷以外のもの（ドライアイス、水以外の液体など）を入れないでください。
6. 塩は入れないでください。サビの原因となります。
7. お湯を入れて使用しないでください。火傷の原因となります。
8. 冷蔵庫、冷凍庫などで本製品を直接冷やすことはしないでください。
9. 浴室などの湿度の高い所では使用しないでください。
10. 本製品を接続する前に、本体が正常に作動することを確認し、正しく使用してください。
11. しばらく使用しなかった場合は、正常かつ安全に作動することを確認してご使用ください。
12. ヘッド部に傷が付いている場合は使用しないでください。肌を傷つけるおそれがあります。
13. リング型電極ケーブルの接続部は防水仕様ではありませんので、濡らさないでください。
14. ヘッド部が金属性の物（ネックレス・ベルト・時計など）に触れないようにしてください。急激な刺激がかかることがあります。
15. 氷を入れた後は、しっかりとヘッド部を閉めてください。使用中に水が漏れたり、ヘッド部が外れるおそれがあります。
16. 落下防止のため、ストラップを取り付け、手首にかけて使用してください。
17. ケーブル部分を持って持ち上げないでください。断線や故障の原因となります。

18. 本製品を持ちながら、接続する機器の操作を行う場合は、接触による破損、水分付着などによる故障に注意してください。
19. 使用部位に発疹・発赤・かゆみなどが現れた場合は、直ちに使用を中止してください。
20. 本品を勝手に修理したり、改造したりしないでください。事故の原因となります。
21. リング型電極ケーブルのリング部分とケーブル部分は一体になっています。取り外しはできませんので、過度な力を加えないようにしてください。断線や故障の原因となります。



22. リング型電極ケーブルは消耗品です。安全にお使いいただくために遅くとも1年以内には交換してください。長年使用すると、断線などで火傷・火災などの事故の原因となることもあります。
23. 本製品は消耗品です。使用状態により異なりますが、安全にお使いいただくために遅くとも3年以内には交換してください。3年以上使用した本製品による事故については、当社は責任を負いかねる場合もございますので予めご理解をお願いいたします。
24. 本製品に損傷など不具合が生じているときは、使用を中止し、販売店または発売元へご連絡ください。
25. 使用後は必ず本体内の氷・水を捨て、水分、汗、皮脂などを拭き取り、乾燥させてから清潔に保管してください。
26. 本製品または、容器・包装品などを廃棄する場合は、環境への影響を少なくするため、地域で定められている規則に従って処分してください。

## 各部名称・仕様

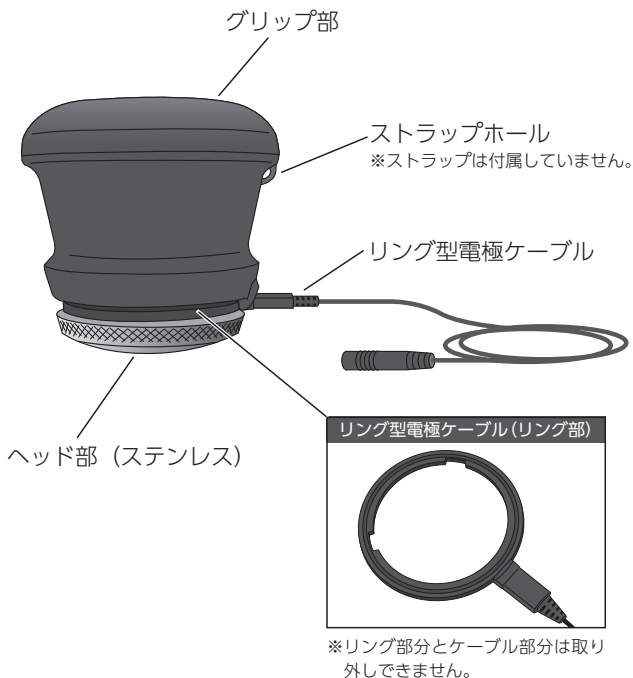

本体サイズ：(横)71mm×(縦)89mm×(高さ)88mm  
(リング型電極ケーブル含まず)

重量：約300g (内容物含まず)


この取扱説明書のイラストはイメージであり、実際とは異なる場合があります。

# 使用方法

- ① 本体をしっかりと持ち、ヘッド部を反時計回りに回して取り外します。

## ⚠ 注意

ケーブル部分を持って持ち上げないでください。断線や故障の原因となります。

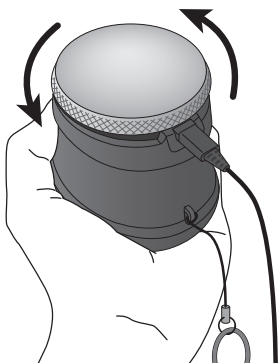


- ② 本体に氷を入れます。

氷の量は家庭用製氷機の氷(30mm角程度)で2個が適当です。氷が多すぎるとヘッド部がしっかりと閉まらないのでご注意ください。

## ⚠ 注意

氷以外のものは入れないでください。

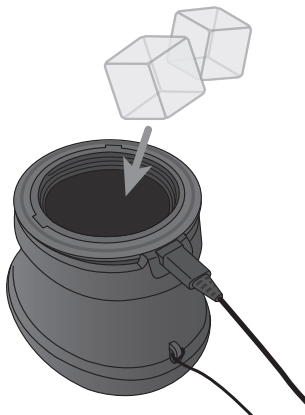


## 使用方法

---

- ③ 中身がこぼれないように注意して、ヘッド部を時計回りに回して取り付けます。

使用中に水が漏れたり、ヘッド部が外れたりしないよう、**ガタつきがなくなるまでしっかりと閉めてください。**

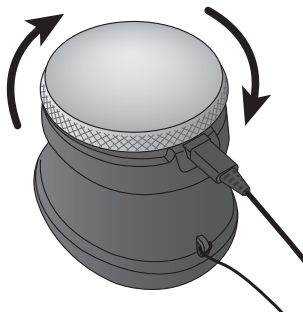


### ⚠ 注意

ヘッド部を取り付ける際は、リング型電極ケーブルが、本体の切り欠きにしっかりとハマっていることを確認してください。水漏れや破損の原因となります。

リング型電極ケーブルの取り付け方については、P.11 をご覧ください。


- ④ 接続コードを、ヒーリングカレント導子のリング型電極ケーブルに差し込みます。

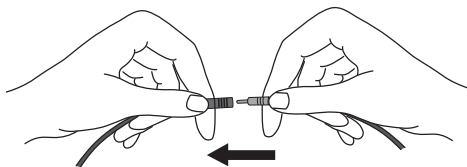




**5** 接続コードのもう一方に粘着パッドを差し込みます。

※使用する粘着パッドは1枚です。

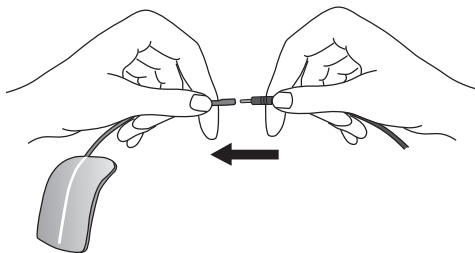

**6** 接続する機器の出力口に接続コードを差し込みます。

※出力口（CH）が2つある場合は、どちらを使用しても構いません。

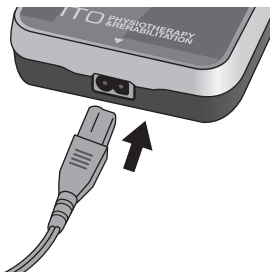


**7** ケアを行う部位からやや離れた部位に粘着パッドをしっかりと貼り付けます。



## 使用方法

- ⑧ ヘッド部が結露したら、肌に軽く押し当てます。結露しない場合は、水が垂れない程度にヘッド部を濡らしてください。

※氷を入れた後、ヒーリングカレント導子を振ることで、ヘッド部を早く冷やすことができます。  
※水分が不足すると通電性や肌の滑りが悪くなりますので、使用中に乾いてきた場合は改めて水で濡らしてください。

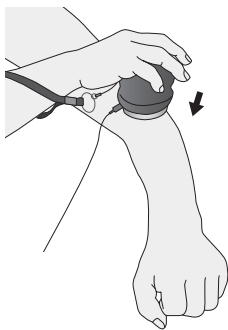

### ⚠️ 注意

- ・落下防止のため、ストラップを取り付け、手首にかけて使用してください。
- ・使用中は、ケアを行う部位以外がヘッド部（金属部分）に触れないようにしてください。ヒーリングカレント導子を持つ手などがヘッド部に触れると、意図せぬ部位に電流が流れるおそれがあります。

- ⑨ ヘッド部を肌に当てた状態で出力を開始します。  
接続する機器の取扱説明書に従い、正しくご使用ください。

### ⚠️ 注意

- ・ツインビート R に接続する場合は、「ケアコース」以外では使用しないでください。「ケアコース」以外で使用すると、思わぬ電流が流れ、事故の原因となるおそれがありますので、絶対に使用しないでください。
- ・同じ部分へ長い時間当てないでください。血行障害や凍傷の原因となるおそれがあります。

## 使用後


---

- ① 接続コード、ヘッド部、リング型電極ケーブルを取り外して本体内の氷・水を捨て、乾いた布などで水分を拭き取ります。
- ② ヘッド部に付いた水分、汗、皮脂などを拭き取ります。
- ③ 十分に乾燥させてからヘッド部を取り付けます。

※水分が残った状態でヘッド部を取り付けるとサビの原因となります。

### ⚠注意

- ・リング型電極ケーブルのリング部分とケーブル部分は一体になっていますので、取り外す際は無理な力がかからないようにしてください。破損や断線の原因となります。
- ・リング型電極ケーブルを取り付ける際は、本体の切り欠きにしっかりとハマっていることを確認してください。水漏れや破損の原因となります。

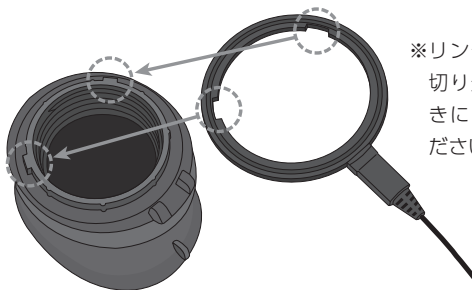

※リング型電極ケーブルの切り欠きを本体の切り欠きにしっかりとハマらせてください。


# 断線チェックについて

接続コードやヒーリングカレント導子のリング型電極ケーブルに断線が疑われる場合は、以下の手順でチェックを行ってください。

## AT-mini シリーズと接続する場合

- 1 接続コードにリング型電極ケーブルを接続します。

※接続コードのもう一方には、何も取り付けないでください。

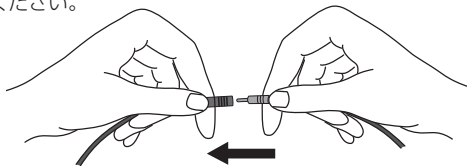

- 2 出力口 (CH) に接続コードを差し込みます。

※出力口 (CH) が2つある場合は、どちらを使用しても構いません。



- ③ 接続コードの先端の金属部分とリング型電極ケーブルのリング部分を接触させます。



- ④ AT-mini シリーズの取扱説明書に従い断線チェックを行います。

※リング部分であれば、どこに接触させても構いません。


※断線が認められた場合は、使用を中止し、お買い求めの販売店もしくは発売元へお問い合わせください。

- ⑤ AT-mini シリーズの取扱説明書に従い断線チェックを終了します。

## ツインビート R と接続する場合

- ① 接続コードにリング型電極ケーブルを接続します。


※接続コードのもう一方には、何も取り付けないでください。

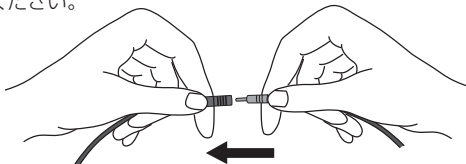



## 断線チェックについて

- ② 出力口に接続コードを差し込みます。

※出力口CH1、CH2どちらに差し込んで構いません。

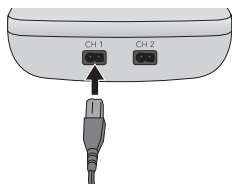

- ③ 電源を入れ、「トレーニングコース」または「リラクスクース」を選択します。次にトレーニングコースまたはリラクスクースの「任意のモード（部位）」を選択します。

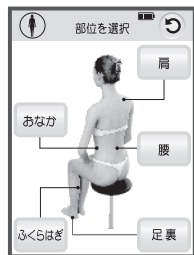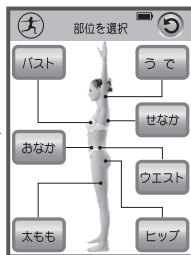

「トレーニング」または「リラククス」を選択します。

モードの選択はどの部位を選んでも構いません。

### ⚠注意

「トレーニングコース」、「リラクスクース」は、断線チェックを行うとき以外には使用しないでください。

身体に通電する際は、必ず「ケアコース」を選択してください。

- ④ 接続コードの先端の金属部分とリング型電極ケーブルのリング部分を接触させます。


※リング部分であれば、どこに接触させても構いません。



- ⑤ 接続コードを差し込んだ CH の出力調節スイッチ「▲」を押して、出力レベルを「10」まで上げます。エラーが表示されなければ正常です。



接続コードを差し込んだ CH の出力を「10」まで上げます。

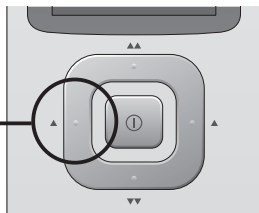

- ※出力調節スイッチ「▲▲」でCH1、CH2の出力を同時に上げるとエラーになります。必ず接続コードを差し込んだ側の出力だけを上げてください。  
※断線が認められた場合は、使用を中止し、お買い求めの販売店もしくは発売元へお問い合わせください。

- ⑥ ツインビート R の取扱説明書に従い本体の電源を切り、断線チェックを終了します。

# 保証書

本証は、お買い上げいただいた製品が、厳密な検査基準に合格したものであることを証明します。また、保証規定の内容にて保証いたしますので、よくお読みの上、保管してください。

品名 (型式)	ヒーリングカレント導子
製造番号	
ご購入年月日	年 月 日
保証期間	ご購入日から1年間

お客様名	フリガナ
電話番号	( )
ご住所	都道府県

販売店名	
電話番号	( )
住所	(〒 - ) 都道府県

## 保証規定

1. 取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合は、ご購入年月日より1年間、無料で交換いたします。
2. 交換の際は、必ず本証をご提示ください。
3. 本証は日本国内においてのみ有効です。また再発行いたしませんので大切に保管してください。
4. 保証期間内でも次の場合は保証の対象とはなりません。
  - 取扱説明書に記載のない使用・誤用・乱用による故障。
  - 火災・地震・水害・その他天災および盗難等の災害による故障。
  - 弊社以外での修理や改造による故障。
  - 雷・規格外電圧での使用などの外部異常電圧による故障。
  - 付属品の交換。
  - 本証の提示がない場合また必要事項の記入がない場合。
  - 使用中に生じたキズなどの外観の変化。
5. 本製品の補修用性能部品の保有年数は、製造打切後7年です。
6. 「転居」などで、ご購入販売店の対応が受けられない場合は、発売元へご連絡ください。
7. 販売店印、購入年月日の記載がない場合は領収書をご提示ください。(通信販売にてお買い上げのお客様は、お届け伝票をご提示ください。)

発売元

 伊藤超短波株式会社

発売元  伊藤超短波株式会社

〒332-0017 埼玉県川口市栄町 3-1-8

TEL. 048 (254) 1019 (お客様センター) <https://www.itolator.co.jp/>